

CÓMO EMPAREJAR EL COM-DEX Y EL COM-DEX REMOTE MIC CON UN TELÉFONO MÓVIL



DEX™

A WIRELESS WORLD

Recomendamos emparejar primero el teléfono con el COM-DEX y, a continuación, con el COM-DEX Remote Mic.

PRIMER PASO

PARA EMPAREJAR EL COM-DEX CON UN TELÉFONO MÓVIL:

1. Asegúrese de que el COM-DEX Remote Mic está apagado.
2. Cierre el collar inductivo del COM-DEX. La luz LED lateral del COM-DEX parpadeará en rojo y azul.
3. Active el Bluetooth del teléfono móvil.
4. En el menú Bluetooth, seleccione el COM-DEX de entre la lista de dispositivos Bluetooth.

SEGUNDO PASO

PARA EMPAREJAR EL COM-DEX REMOTE MIC CON EL COM-DEX:

1. Desactive el Bluetooth del teléfono móvil.
2. Cuando el collar inductivo esté cerrado, la luz LED lateral del COM-DEX empezará a parpadear en rojo y azul. En caso contrario, abra el collar inductivo durante 20 segundos y ciérrelo de nuevo.
3. Para poner en marcha el COM-DEX Remote Mic, pulse el botón de encendido durante 3 segundos. La luz LED de la parte superior del COM-DEX Remote Mic empezará a parpadear en rojo y azul.
4. Cuando la luz LED de la parte superior del COM-DEX Remote Mic se ponga verde, se habrá establecido la conexión entre el COM-DEX Remote Mic y el COM-DEX.
5. Active el Bluetooth del teléfono móvil y seleccione el COM-DEX de entre la lista de dispositivos Bluetooth.

INDICADORES LED DEL COM-DEX REMOTE MIC

LED, luz superior:



Dispositivo encendido; transmisión en marcha



Dispositivo encendido; transmisión pausada



Dispositivo encendido; no conectado al COM-DEX

LED, luces superior y lateral:



Modo de emparejamiento



Batería baja: parpadeo ocasional en rojo

LED, luz lateral:



Batería completamente cargada; luz LED lateral



Cargando; luz LED lateral

Nivel de sonido; luz LED superior;



Nivel de sonido: bajo



Nivel de sonido: medio



Nivel de sonido: alto

